

Calzino 18

Cotone **UNISEX** - Cotone **MAN** - Sintetico **MAN**

Istruzioni

Raccogliere il calzino fino al tallone, rovesciarlo, infilare il piede e con estensione e trazione, accompagnarlo fino al sotto ginocchio avendo cura di stenderlo, sono da evitare risvolti. Si raccomanda che l'arto sia asciutto.

Manutenzione

Al fine di preservare la funzionalità elastocompressiva del calzino, se ne raccomanda il lavaggio dopo l'utilizzo, preferibilmente a mano a circa 30°C con sapone neutro senza ammorbidente, risciacquarlo con abbondante acqua tiepida, non strizzarlo, asciugarlo lontano da fonti di calore, evitare di esporlo alla luce diretta del sole, non stirarlo.

Avvertenze

E' importante individuare la giusta taglia coadiuvati dal rivenditore in modo da ottenere il miglior risultato terapeutico. Prestare attenzione a unghie ed anelli, possono danneggiare la calza. Si consiglia l'uso di guanti in gomma. Non utilizzare direttamente su ferite aperte e cute lesa. Tenere la calza lontana dalla portata dei bambini (pericolo soffocamento).

Essendo questo articolo considerato Dispositivo Medico di Classe I l'utilizzatore è tenuto a seguire scrupolosamente le istruzioni di utilizzo e le avvertenze riportate. L'azienda non si rende responsabile di eventuali danni a persone o cose in caso di uso improprio dell'articolo contenuto nella confezione.



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
non sterile

