

CARATTERISTICHE DELLE CALZE TERAPEUTICHE

Compressione decrescente
Fabbricate con macchine ad alta tecnologia



MD DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I non sterile
se ne consiglia l'acquisto tramite prescrizione medica



Istruzioni

E' consigliabile indossare le calze al mattino appena svegli quando le gambe sono ancora sgonfie avendo cura di rovesciarle dall'alto fino al tallone, con l'aiuto del puntale in dotazione posizionato sul piede (solo per modello punta aperta). Introdurre la calza fino al collo del piede, accompagnarla lungo la gamba e rimuovere il puntale. Una volta posizionata, con piccoli movimenti a mani aperte, sistemare la calza eliminando eventuali grinze e risvolti (procedura facilitata dall'utilizzo dei guanti Flebysan). Si raccomanda che l'arto sia asciutto.

Manutenzione

Al fine di preservare la funzionalità elastocompressiva della calza e l'ancoraggio del silicone all'arto (modello autoreggente), si raccomanda il lavaggio dopo l'utilizzo, soprattutto se si fa uso di creme o unguenti. Lavaggio a mano a circa 30°C con sapone neutro senza ammorbidente, risciacquare con abbondante acqua, non strizzare, asciugare lontano da fonti di calore e dal sole, non stirare.

Avvertenze

Si consiglia di consultare un medico specialista prima di utilizzare le calze terapeutiche. E' importante individuare la giusta taglia coadiuvati dal rivenditore, in modo da ottenere il miglior risultato terapeutico. Prestare attenzione a unghie ed anelli, possono danneggiare la calza, allo scopo si consiglia l'uso dei guanti Flebysan. Non utilizzare direttamente su ferite aperte e cute lesa. In caso di perdita di elasticità o se rovinate/usurate, non utilizzare e ricontattare lo specialista. In caso di effetti collaterali gravi contattare lo specialista o il medico curante. Gli avvenimenti gravi sono definiti ai sensi dell'articolo 2 n. 65 del regolamento (ue) 2017/754 (MDR). Tenere la calza lontana dalla portata dei bambini (pericolo soffocamento).

Controindicazioni ed Effetti collaterali

Arteriopatia grave. Neuropatie. Dermatiti allo stadio acuto e dermatosi infettive ed essudative. Insufficienza cardiaca scompensata. Se utilizzate impropriamente, le calze terapeutiche possono causare lesioni cutanee e compromettere la circolazione arteriosa. Non sono note allergie se non quelle specifiche dei componenti.

Essendo questo articolo considerato Dispositivo Medico di Classe I l'utilizzatore è tenuto a seguire scrupolosamente le istruzioni di utilizzo, le avvertenze e le controindicazioni riportate. L'azienda non si rende responsabile di eventuali danni a persone o cose in caso di uso improprio dell'articolo contenuto in questa confezione.