

# Linea MICROFIBRA

## Istruzioni

Raccogliere la calza fino al tallone, rovesciarla, infilare il piede e con estensione e trazione, accompagnarla fino al sotto ginocchio e alla coscia avendo cura di stenderla, sono da evitare risvolti. Indossarla preferibilmente in posizione orizzontale. Si raccomanda che l'arto sia asciutto.

## Manutenzione

Al fine di preservare la funzionalità elastocompressiva della calza e l'ancoraggio del silicone all'arto (modello autoreggente), si raccomanda il lavaggio dopo l'utilizzo, soprattutto se si fa uso di creme o unguenti, preferibilmente a mano a circa 30°C con sapone neutro senza ammorbidente, risciacquarle con abbondante acqua tiepida, non strizzarle, asciugarle lontano da fonti di calore, evitare di esporle alla luce diretta del sole, non stirarle.

## Avvertenze

E' importante individuare la giusta taglia, coadiuvati dal rivenditore, in modo da ottenere il miglior risultato terapeutico. Prestare attenzione a unghie ed anelli che possono danneggiare la calza, allo scopo si consiglia l'uso dei guanti Flebysan. Non utilizzare direttamente su ferite aperte e cute lesa. In caso di perdita di elasticità o se rovinate/usurate, non utilizzare e ricontattare lo specialista. In caso di effetti collaterali gravi contattare lo specialista o il medico curante. Gli avvenimenti gravi sono definiti ai sensi dell'articolo 2 n. 65 del regolamento (ue) 2017/745 (MDR). Tenere la calza lontana dalla portata dei bambini (pericolo soffocamento).

## Controindicazioni ed Effetti collaterali

Arteriopatia grave. Neuropatie. Dermatiti allo stadio acuto e dermatosi infettive ed essudative. Insufficienza cardiaca scompensata. Se utilizzate impropriamente, le calze terapeutiche possono causare lesioni cutanee e compromettere la circolazione arteriosa. Non sono note allergie se non quelle specifiche dei componenti

Essendo questo articolo considerato Dispositivo Medico di Classe I l'utilizzatore è tenuto a seguire scrupolosamente le istruzioni di utilizzo e le avvertenze riportate. L'azienda non si rende responsabile di eventuali danni a persone o cose in caso di uso improprio dell'articolo contenuto in questa confezione.



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I  
non sterile

